

歯周病リスク郵送自己検査を受けてみませんか。方法は簡単!

歯ぐきが下がった気がする

歯ぐきから出血する

歯ぐきから膿がでる

歯ぐきが腫れて痛くなる



歯の健康は生活のバロメーター!
定期的なチェックの機会としてぜひご活用ください

対象者

30歳以上の被保険者・被扶養者

費用

無料

申込方法

必要事項を記入の上、
きんでん健康保険組合宛に申込書を送付してください。

申込締切日

2023年11月10日(金) 必着

委託業者 H.U.POcKeT株式会社
検査機関 ファセリア臨床検査センター
〒179-0082 東京都練馬区錦2-9-14

検体郵送締切日

2023年12月15日(金) 必着

個人情報の取り扱いについて
申込書に記入した個人情報はこの事業のみに
使用し、目的外に使用することはありません。



キリトリ線

2023年 月 日

きんでん健康保険組合 御中
歯周病リスク検査申込書

申込締切日 2023年11月10日(金) 必着

| | | | | |
|------|------|-------|-------------|--|
| 被保険者 | 記号番号 | — | 氏名 | |
| | 所 属 | (会社名) | (室・部・支店(株)) | |

| 検査を受ける方 | 氏名 | 住所 | 電話番号 | 生年月日・年齢・性別 | 続柄 | |
|---------|------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| | フリガナ | 〒 | | | 西暦 年 月 日 ()歳 男・女 | 本人・家族 |
| | | | ☎() - | | | |
| | フリガナ | 〒 | | | 西暦 年 月 日 ()歳 男・女 | 本人・家族 |
| | | ☎() - | | | | |
| フリガナ | 〒 | | | 西暦 年 月 日 ()歳 男・女 | 本人・家族 | |
| | | ☎() - | | | | |

(注) 1. 被保険者記号番号とは保険証に記載されている記号・番号です。

2. 受検できるのは、30歳以上の被保険者および被扶養者(当健保の健康保険証が発行されている方)です。

歯周病は多くの研究から全身の病気と深い関係が明らかに！

歯周病リスク検査を受けましょう！

検査で何がわかるの？

歯周病菌として認知されているレッドコンプレックス（歯周病原因菌の最も病原性が高いグループ）の3菌種が産生する酵素を測定し、歯周病のリスクをABCの3段階で判定します。

- 【レッドコンプレックスの3菌種】
1. Porphyromonas gingivalis (ポルフィロモナス・ジンジバリス)
 2. Tannerella forsythia (タネレラ・フォーサイシア)
 3. Treponema denticola (トロンネマ・デンティコラ)

正しい採り方




起床直後に採取してください


準備

- 1** 記入ラベルと抽出液の入った青色の袋に氏名、採取日を記入。


| | |
|-----|-------------|
| 採取日 | 2021年 3月 4日 |
| 氏名 | 日本一郎 |

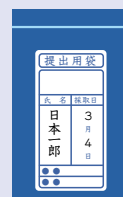

- 2** 舌全体を10回以上舌ぬぐい用スポンジ綿棒の表裏でふき取るようにぬぐう。

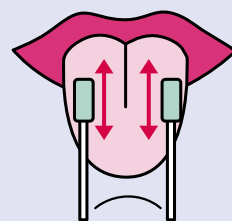

舌ぬぐい用スポンジ綿棒を抽出液に差し込み10回ゆっくり回す。

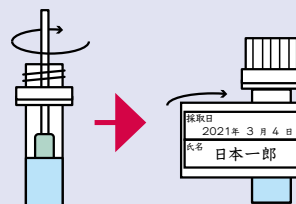

採取

抽出液のフタを閉めラベルを貼る。

注意

- ① 容器の中の検体は捨てないでください。
- ② 子どもの手の届かない所に保管してください。
- ③ 検体採取後は、高温・直射日光は避けてください。

送付

- 3**
- ① 付属の提出用袋に入れる。
 - ② 受付票と提出用袋（検体）を返信用封筒に入れ郵送する。

※採取後はなるべく早めに送ってください。

